

Je rentre chez moi avec...

Inview

Trucs et astuces

- ✓ En cas de doute entre deux tailles, choisissez la plus petite des deux.
- ✓ L'utilisation d'antiseptique, de corps gras ou d'éther sur la verge est à proscrire, afin de conserver une peau saine.
- ✓ Faites une toilette au savon neutre 1 fois par jour. Séchez bien la peau.
- ✓ N'utilisez pas d'étui pénien en cas d'irritation ou de lésion cutanée. Utilisez alors un produit de type collecteur urinaire.
- ✓ Attendez 10 minutes après un bain ou une douche avant de poser l'étui pénien.
- ✓ S'il y a des restes de colle, ils partiront lors d'un prochain retrait. Il ne faut pas essayer de les retirer en frottant ou en utilisant un produit autre que du savon neutre.

l'Etui pénien InView: le bon choix!

Hollister propose une gamme complète d'étuis péniers (3 modèles déclinés en 5 diamètres) pour répondre parfaitement aux besoins de chacun:

	InView	22-25mm	26-29mm	30-32mm	33-36mm	37-41mm
	Special: verge de 1cm à 4cm	97125	97129	97132	97136	97141
	Standard: verge de 4cm et plus	97225	97229	97232	97236	97241
	Extra: verge de 4cm et plus avec adhésif renforcé	97325	97329	97332	97336	97341

Poches	500ml	800ml	2l
Poches de jambe	9652	9653	-
Poche de nuit	-	-	9431-20

Accessoires	S	M	L
Lanières de fixation	-	9625	-
Filets pour poches de jambe	9612	9613	9614

*InView,
l'étui pénien
auto-adhésif
sans latex:
facile à poser.*



Besoin d'un conseil ou d'un renseignement sur un produit?




Avec vous à chaque instant

0800 90626 hollistercontact@hollister.com

www.hollister.be

Hôpital:
Service:
Personne référente:
Tél.:

Préparation

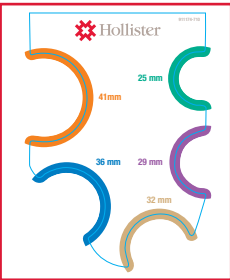

- ✓ Utiliser la bonne taille d'étui pénien garantit son efficacité. Pour cela, il faut placer un périmètre à la base de la verge et mesurer le diamètre.
- ✓ Procédez à une toilette au savon neutre, rincez bien, puis séchez délicatement la peau.
- ✓ Les poils du pubis doivent être coupés aux ciseaux ou tondus (ne pas les raser pour éviter toute irritation)


Mise en place



- ✓ Si l'étui pénien est emballé sur un support, retirez-le.
- ✓ Pincez l'extrémité de l'étui pénien entre le pouce et l'index.
- ✓ Etirez légèrement la verge si nécessaire




- ✓ Posez l'étui pénien, pincé entre vos doigts, contre le gland non décalotté. Ceci permet de laisser un espace de 2 à 3cm entre le gland et le bout de "l'entonnoir" de l'étui.
- ✓ Déroulez l'étui pénien le long de la verge en évitant la formation de plis.

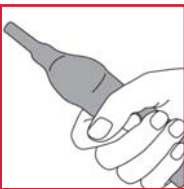

- ✓ Exercez une légère pression sur l'étui pénien autour de la verge de manière à garantir l'étanchéité du système.
- ✓ Une fois l'étui en place, connectez-le à une poche de recueil.

Retrait

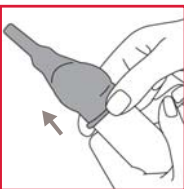

- ✓ Après avoir déconnecté la poche à urine, enroulez l'étui pénien sur lui-même pour le retirer.
- ✓ Lavez votre verge au savon neutre, rincez et séchez bien, puis mettez en place un nouvel étui.

Durant la journée



Vous souhaitez sortir de chez vous, bouger, marcher, avoir plus d'autonomie et de discrétion?
Alors remplacez la poche de nuit par une poche de jour (de jambe) vidangeable de 500 ou 800ml, dont la tubulure se recoupe pour s'adapter parfaitement à votre morphologie.

*Les lanières réglables en longueur:
On les glisse face antidérapante vers la peau dans les trous situés en haut et en bas de la poche et on l'accroche.*


*Le filet de confort:
Il s'enfile comme une chaussette (liseré de couleur vers le haut) et se place sur le mollet ou sur la cuisse. On glisse ensuite la poche de jambe dans la poche du filet. Il peut être lavé à 30°C.*

Le filet de confort est particulièrement indiqué en cas de problème circulatoire ou cardiaque. Il permet d'éviter l'effet garrot.

Sur le mollet Sur la cuisse



Pour la nuit

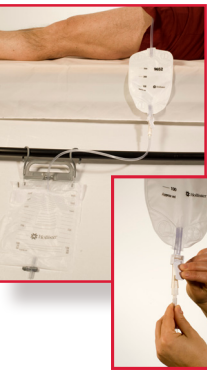

- Pour plus de liberté de mouvement vous avez deux choix, vous pouvez:
- enlevez votre poche de jour (de jambe) si vous en portiez une et remplacez-la par une poche de nuit de 2L qui possède une tubulure plus longue. Le lendemain matin, remettez votre poche de jour.
 - raccordez la poche de nuit à la tubulure de vidange de votre poche de jour et ouvrez son robinet de vidange. Le lendemain matin fermez le robinet de la poche de jour et déconnectez la poche de nuit.

Pour plus de sécurité la nuit, fixez la tubulure de la poche à votre cuisse avec une bande adhésive.

Dans les deux cas vous devrez vider et rincer la poche que vous déconnecterez et remettre son capuchon.



Durée de port:



1 étui
par jour



1 poche de
jambe tous
les 4 ou 5 jours



1 poche de
nuit tous
les 4 ou 5
jours