

## Adapt Retrait d'adhésif



### Indications et avantages

- Facilite le retrait du protecteur cutané.
- Enlève les résidus de colle de la peau.
- Aide à la prévention de lésions cutanées suite au retrait du protecteur cutané répétitif.
- Ne gêne pas l'appareillage suivant
- Sèche rapidement et ne laisse pas de résidu.

### Caractéristiques

- Spray ou lingettes
- Sans parfum
- Formulation à base de silicone
- Permet une vaporisation 360°



### Comment utiliser le spray?

1. Agitez le spray.
2. Retirez un bout du protecteur cutané et vaporiser le spray sur le pourtour. La technologie 360° vous permettra d'utiliser le spray dans différentes positions.
3. Attendez quelques secondes, puis retirez délicatement le protecteur cutané.
4. Renouvelez l'opération si besoin.
5. Attendez quelques secondes que le produit sèche avant de positionner un nouvel appareillage.



### Comment utiliser les lingettes?

1. Retirez un bout du protecteur cutané et frottez délicatement sur le pourtour.
2. Frottez délicatement les résidus adhésifs sur la peau avec la lingette.
3. Attendez quelques secondes que le produit sèche avant de positionner un nouvel appareillage.



### Questions fréquemment posées

Est-il indispensable d'utiliser ce spray ou ces lingettes?

Non, l'utilisation n'est pas obligatoire, mais simplifie le retrait du protecteur cutané ou l'enlèvement de résidus sur la peau.

Puis-je les utiliser si ma peau irritée?

Leur formule sans alcool ne provoque ni sensation de froid ni picotement même sur une peau lésée.

Référence	Type	Boîte de	Liste INAMI	Code INAMI	CNK
7731	Spray 100ml	1	-	-	0199 281
7760	Lingettes	1	-	-	2682 201

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister:

**010 23 04 77 - [belgium.orders@hollister.com](mailto:belgium.orders@hollister.com)**

**Hollister Belgique**  
Branch of Hollister France  
Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)

*Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Hollister et son logo et Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. © Décembre 2018 Hollister Incorporated. OST18F44*