


Mode d'emploi Anchor Fast


- ❑ Pour tubes de 5 mm à 10 mm de diamètre, pas pour usage pédiatrique.
- ❑ **Nettoyer et bien sécher la peau du patient et la sonde.**
- ❑ Réchauffer les protecteurs cutanés entre vos mains
- ❑ Enlever les protections des protecteurs cutanés




Centrer le système au dessus de la lèvre de façon à ce que le tampon blanc touche à peine la peau (ne pas presser)
Presser les protecteurs cutanés sur la peau, et les maintenir appuyés 30 sec

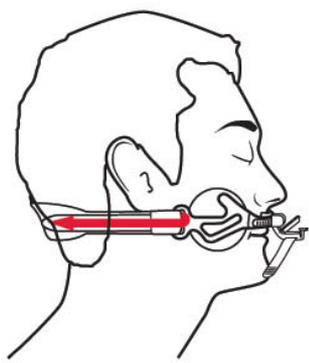


Fixer l'attache de cou à l'aide des bandes auto-adhésives.

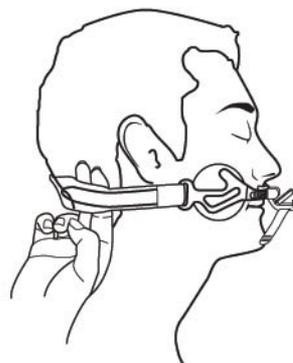

Ne pas trop serrer, laisser la valeur de 2 doigts entre l'attache de cou et le cou.

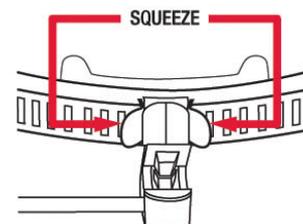

Presser sur les languettes de la navette et faites la glisser le long du guide jusqu'à positionner le système de fixation au dessus de la sonde.

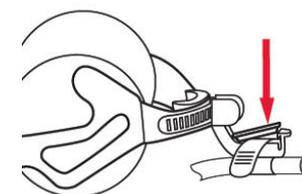

Enlever la protection de la bande adhésive.
Bien centrer la sonde et enrouler la bande de fixation autour de la sonde.
Bloquer la bande de fixation dans la pince.

