


Anchor Fast Gebruiksaanwijzing


- ❑ Voor orale endotracheale sondes van 5 tot 10 mm, niet bestemd voor gebruik bij kinderen.
- ❑ **Reinig en droog de huid van de patiënt, reinig ook de endotracheale sonde.**
- ❑ Verwarm de huidbeschermers tussen uw handen
- ❑ Verwijder de beschermstroken van de huidbeschermers




Plaats het hulpmiddel midden op de bovenlip zodat de schuimrubberen rand net de huid raakt (oefen geen druk uit). Druk de huidbeschermers op de huid van de patiënt en houd deze op hun plaats totdat ze goed hechten (ongeveer 30 seconden).

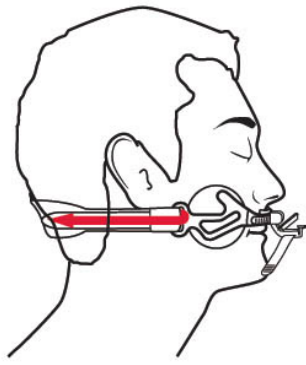


Bevestig de nekband met behulp van de klittenbandsluiting.

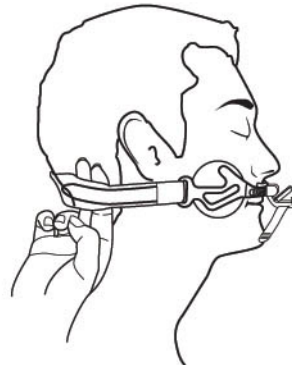

Niet te strak vastmaken. Laat ruimte voor 2 vingerbreedtes tussen de nekband en de achterkant van het hoofd.

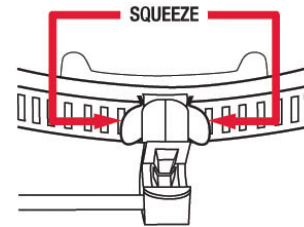

Knijp de lipjes aan de zijkanten van het verplaatsingsmechanisme samen en beweeg de klem langs de geleider naar een plaats boven de sonde.

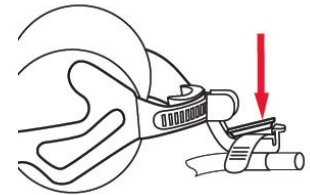

Verwijder de bescherming van de kleefstrook. Centreer de sonde en wikkel de kleefstrook lichtjes rondom de sonde en trek de rest door de klem. Zet de strook vast door de klem dicht te klikken.

