


- Augmentent la surface d'adhésivité et renforcent le sentiment de sécurité contre le risque de fuite
- Evitent que les bords du protecteur cutané roulent ou se décollent
- Aident à porter son appareillage aussi longtemps que recommandé
- S'adaptent aux plis et surfaces irrégulières de la peau, et suivent les mouvements du corps

### Comment les utiliser ?

- 1 Posez votre appareillage habituel (poche et support) **sur une peau propre et sèche**
- 2 Sortez les renforts de leur emballage et **tirez doucement sur chaque extrémité du renfort**
- 3 **Retirez un des deux papiers protecteurs**
- 4 **Placez le renfort autour du support, à cheval entre le bord extérieur du support et la peau.** Retirez ensuite le deuxième papier protecteur, et **lissez le renfort avec les doigts** pour vous assurer qu'il adhère bien sur toute sa surface.
- 5 **Répétez l'opération** pour le deuxième et le troisième renfort si vous en avez besoin.
- 6 **Les renforts se décolleront lorsque vous retirerez votre appareillage pour en changer.**

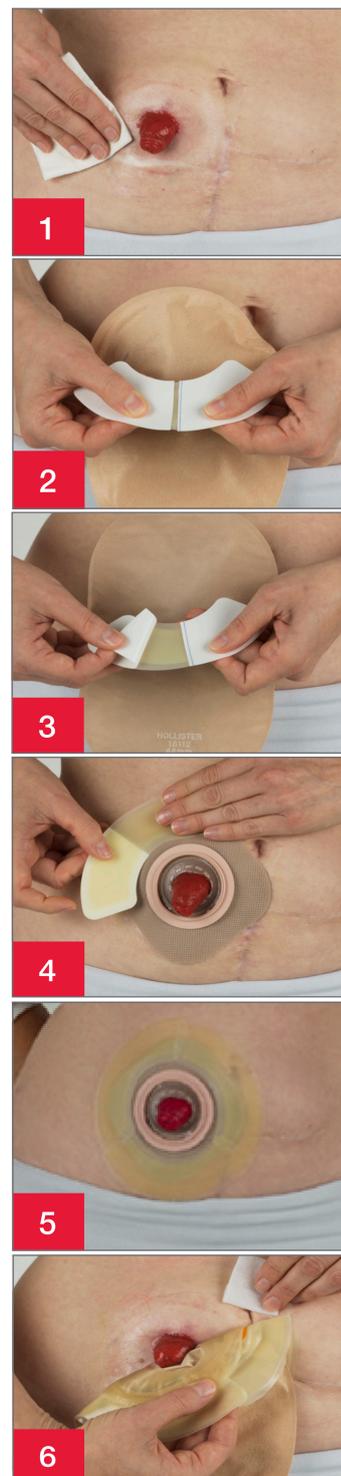

### Questions fréquemment posées

Puis-je utiliser ces renforts avec un support qui intègre déjà des renforts ?	Oui, ces renforts périphériques peuvent compléter n'importe quel appareillage.
Dois-je systématiquement mettre 3 renforts tout autour de mon support ?	Non, la forme et la taille de ces renforts vous permettent d'adapter votre appareillage à vos besoins. Vous pouvez en utiliser plusieurs à la fois ou un seul pour renforcer tout ou partie de votre support.
L'emballage est-il recyclable ?	Oui, Hollister s'efforce de développer des emballages recyclables, tels que les boîtes en carton et en plastique de ces renforts.



Produit	Référence	GTIN
CeraRing Renforts (boîte de 30 unités)	79402	0610075092826

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister

**0 800 479 267** Service & appel gratuits

[assistance.conseil@hollister.com](mailto:assistance.conseil@hollister.com)

**Hollister Inc. France**  
 Tour Franklin  
 100/101 Terrasse Boieldieu  
 92042 Paris La Défense Cedex  
 RCS Nanterre 402 202 733

[www.hollister.fr](http://www.hollister.fr)

Ce document est à destination des patients. Ce matériel s'utilise sur ordonnance et selon les conseils d'un professionnel de santé. Consultez attentivement les instructions figurant sur les notices et/ou étiquetages. Si vous recontactez une urgence médicale, contactez immédiatement un professionnel de santé pour un diagnostic médical.

Les renforts sont des dispositifs médicaux de classe I destinés aux soins de stomie. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés, fabriqués par Hollister Incorporated, qui portent le marquage CE. Ces produits sont pris en charge par l'Assurance Maladie dans le cadre des ALD. Hollister, le logo Hollister, Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated USA. Edition : Juillet 2023 - Réf : FRO292-2.

