

## Anneaux convexes Adapt



### Indications et avantages

- Renforcent l'étanchéité et contribuent à la prévention de fuites.
- Appareillent les stomies
  - rondes
  - ovales
  - planes, invaginées ou dans un pli.
- Ils peuvent être coupés et superposés.

### Caractéristiques

- Protecteur cutané en FlexTend
- Sans alcool, ne piquent pas
- Convexité souple et modérée

### Comment utiliser l'anneau?

1. Retirez les films protecteurs, en commençant par le film blanc.
2. Ajustez l'anneau si nécessaire (p.e. couper en deux) pour lui donner la taille souhaitée.
3. Positionnez l'anneau protecteur convexe directement sur le protecteur cutané, face plane sur l'appareillage, en l'ajustant à la découpe.
4. Appliquez l'ensemble de l'appareillage du bas vers le haut en veillant bien à ce qu'il n'y ait pas de plis cutanés pour éviter tout risque de fuite.
5. Maintenez fermement l'ensemble de l'appareillage quelques secondes.



### Questions fréquemment posées

Est-ce que l'on peut étirer l'anneau?

Il n'est pas recommandé d'étirer l'anneau car il a une forte mémoire de forme.

Puis-je utiliser ces anneaux sur des supports plats et convexes?

Oui. Sur des supports plats une convexité souple modérée est obtenue. Sur des supports convexes, on obtient une convexité ferme profonde. Demandez conseil à votre infirmier(ère) stomathérapeute.

Référence	Type	Diamètre	Poids/pce	Boîte de	Liste INAMI	Code INAMI	CNK
79520	Rond	20mm	6g	10	641071	904025000286	2319 184
79530	Rond	30mm	8g	10	641071	904025000514	2319 192
79540	Rond	40mm	10g	10	641071	904025000523	2319 200
79601	Ovale	22x38mm	10g	10	641071	904025000347	2904 050
79602	Ovale	30x48mm	12,6g	10	641071	904025000356	2904 068
79603	Ovale	38x56mm	13,8g	10	641071	904025000365	2904 241

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister:

**010 23 04 77 - [belgium.orders@hollister.com](mailto:belgium.orders@hollister.com)**

**Hollister Belgique**  
Branch of Hollister France  
Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Hollister et son logo et Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. © Décembre 2018 Hollister Incorporated. OST18F47