

Pâte Adapt



Indications et avantages

- Utilisée pour combler les irrégularités autour de la stomie.
- Assure une meilleure étanchéité afin de prévenir le risque de fuites.

Caractéristiques

- Faible teneur en alcool
- Tube plastique pelliculé facile à presser
- Bouchon rouge facile à identifier

Comment utiliser la pâte?



1. Appliquez la pâte:
 - A. sur le protecteur cutané autour de la découpe centrale ou
 - B. directement sur la peau autour de la stomie afin de combler les irrégularités.
2. Si besoin étalez la pâte avec le doigt préalablement mouillé.
3. Attendez quelques instants et placez l'appareillage comme d'habitude.
4. Rebouchez soigneusement le tube après usage.

Questions fréquemment posées

Pourquoi ai-je une sensation de picotements lorsque j'applique la pâte?

La pâte contient de l'alcool en petite quantité afin d'augmenter sa résistance aux matières et aux liquides et afin de faciliter l'application. Cette sensation est passagère et s'estompe très vite. Pensez éventuellement à utiliser un anneau Adapt à la place.

Quels sont les risques si la pâte entre en contact avec ma stomie?

Cette pâte a été conçue pour les stomies. Elle n'est donc pas nocive et il n'y a pas de risque d'obstruction de la stomie.

Il reste quelques résidus de pâte sur ma peau. Comment faire pour les enlever?

Vous pouvez retirer la pâte lors de votre soin avec de l'eau tiède. S'il reste quelques traces, ne frottez pas, les résidus partiront au retrait du prochain appareillage. Vous pouvez aussi utiliser une lingette pour retrait d'adhésif Adapt.

La pâte permet-elle à ma poche de mieux adhérer?

La pâte sert de joint. Elle prévient les risques de fuite entre le protecteur cutané et votre peau mais ce n'est pas un adhésif.

Référence	Type	Poids/Pce	Boîte de	Liste INAMI	Code INAMI	CNK
79300	Tube	60g	1	641071	904025000277	1750 108
79301	Mini tube	14g	6	641071	904025000243	2384 188

En cas de doute, merci de vous référer à l'emballage du produit ou de contacter le service clients Hollister:

010 23 04 77 - belgium.orders@hollister.com

Hollister Belgique
Branch of Hollister France
Chaussée des Collines 52
1300 Wavre

www.hollister.be

Ce document est destiné à l'usage des professionnels de santé. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Hollister et son logo et Adapt sont des marques déposées de Hollister Incorporated, USA. © Décembre 2018 Hollister Incorporated. OST18F46