

Adapt Oplosmiddel



Indicaties en voordelen

- Vergemakelijkt het verwijderen van de huidplaat.
- Verwijdert kleefresten van de huid.
- Helpt huidletsels ten gevolge van herhaaldelijk verwijderen van de huidplaat te voorkomen.
- De volgende huidplaat kan zonder probleem aangebracht worden.
- Droogt snel en laat geen resten na.

Eigenschappen

- Spray of doekjes
- Bevat geen parfum
- Formule op basis van silicone
- 360° sprayrichting



Gebruiksaanwijzing spray

1. Schud de spray.
2. Maak een hoekje van de huidplaat los en spray rondom. De 360° technologie zorgt ervoor dat u in alle richtingen kan sprayen.
3. Wacht enkele seconden en verwijder dan voorzichtig de huidplaat.
4. Herhaal indien nodig.
5. Laat enkele seconden drogen vooraleer een nieuwe huidplaat aan te brengen.



Gebruiksaanwijzing doekjes

1. Maak een hoekje van de huidplaat los en wrijf voorzichtig onder de plaat tot die volledig lost.
2. Verwijder vervolgens voorzichtig de kleefresten.
3. Laat enkele seconden drogen vooraleer een nieuwe huidplaat aan te brengen.



Veelgestelde vragen

Is het noodzakelijk de spray of doekjes te gebruiken?

Neen, het gebruik is niet verplicht maar vergemakelijkt het verwijderen van de huidplaat of de kleefresten.

Mag ik de spray en de doekjes gebruiken bij een geïrriteerde huid?

De formule bevat geen alcohol en zal dus geen koude- of branderig gevoel uitlokken op een beschadigde huid.

Referentie	Type	Doos van	RIZIV lijst	RIZIV code	CNK
7731	Spray 100ml	1	-	-	0199 281
7760	Doekjes	1	-	-	2682 201

Gelieve bij twijfel te refereren naar de verpakking van het product of contact op te nemen met de Hollister Customer Service:

010 23 04 77 - belgium.orders@hollister.com

Hollister België
Branch of Hollister France
Chaussée des Collines 52
1300 Wavre

www.hollister.be

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen. Opgelet, lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. Hollister en zijn logo en Adapt zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA. © December 2018 Hollister Incorporated. OST18N44