

## Adapt Ringen



### Indicaties en voordelen

- Vullen oneffenheden rond de stoma op.
- Zorgen voor een goede afdichting en helpen het risico op lekkage te voorkomen.
- **Adapt CeraRing: formule met ceramide, helpt de peristomale huid gezond te houden.**




### Eigenschappen

- Flexend M formule
- Zonder alcohol, prikt niet
- Hoge absorptiecapaciteit
- Aanpasbaar met de vingers
- Individuele verpakking

### Gebruiksaanwijzing

1. Haal de ring uit zijn verpakking en verwijder de beide beschermfilms.
2. Pas de ring aan met de vingers om hem de gewenste maat, vorm en dikte te geven:
  - A. uitrekken
  - B. verbreken en aanpassen
  - C. afvlakken
  - D. op mekaar plaatsen om een kleinere ring te bekomen.
3. Plaats de ring:
  - A. op de huidplaat of
  - B. rond de stoma.
4. Druk aan gedurende enkele seconden.
5. Breng uw materiaal aan, zoals gewoonlijk.

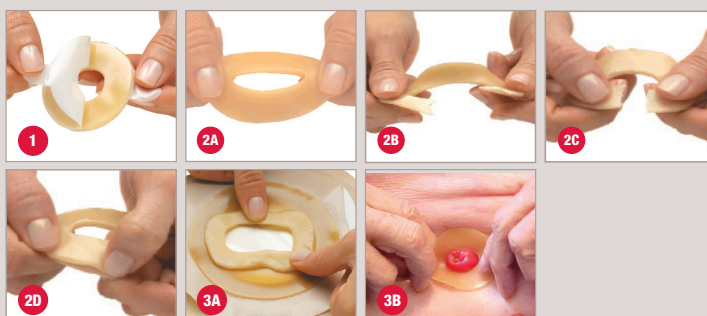

### Veelgestelde vragen

Mag ik de ring gebruiken bij huidirritatie?

De ring bevat geen alcohol, waardoor hij niet prikt. De verrijkte formule van de CeraRing draagt bij tot het versterken van de natuurlijke afweer.

Hoe moet ik de ring verwijderen?

De ring komt mee los bij het verwijderen van de huidplaat. Indien nodig kan u eventueel Adapt Oplosmiddel gebruiken.

Referentie	Type	Diameter	Gewicht/stuk	Doos van	Lijst RIZIV	RIZIV code	CNK
8815	Adapt CeraRing	48mm-2,3mm	3,7g	10	641071	904025000636	3581 568
7805	Adapt Ring	48mm-4,5mm	6g	10	641071	904025000261	2384 196
7806	Adapt Ring	98mm-2,3mm	16,5g	10	641071	904025000532	2384 204

Gelieve bij twijfel te refereren naar de verpakking van het product of contact op te nemen met de Hollister Customer Service:

**010 23 04 77 - [belgium.orders@hollister.com](mailto:belgium.orders@hollister.com)**

**Hollister België**  
Branch of Hollister France  
Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen. Opgelet, lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. Hollister en zijn logo en Adapt zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA. © December 2018 Hollister Incorporated. OST18N45