


## Adapt Convexe Ringen

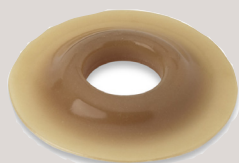

### Indicaties en voordelen

- Zorgen voor een goede afdichting en helpen het risico op lekkages te voorkomen.
- Geschikt voor
  - ronde stoma's
  - ovale stoma's
  - vlakke, teruggetrokken of stoma's in een plooi.
- Ze kunnen doorgeknipt of boven mekaar geplaatst worden.

### Eigenschappen

- Flexend formule
- Zonder alcohol, prikt niet
- Soepele en matige convexiteit

### Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder de beide beschermfilms, te beginnen met de witte film.
2. Pas de ring aan indien nodig (bv in twee knippen) en geef hem de gewenste maat.
3. Plaats de convexe ring met de vlakke zijde op de huidplaat en respecteer hierbij de opening van de huidplaat.
4. Breng het geheel aan rond de stoma, van onder naar boven. Zorg ervoor dat er geen huidplooien ontstaan, zodat lekkage voorkomt.
5. Druk aan gedurende enkele seconden, zodat het materiaal goed kan aanhechten.



### Veelgestelde vragen

Mag de ring uitgerokken worden?

Het wordt niet aangeraden de ring uit te rekken, omdat hij zijn oorspronkelijke vorm terug aan zal nemen.

Mag de ring gebruikt worden op zowel vlakke als convexe huidplaten?

Ja. Bij gebruik op een vlakke huidplaat wordt er een soepele en matige convexiteit bekomen; bij convexe huidplaten een vaste diepe convexiteit. Vraag uw stomaverpleegkundige om advies.

Referentie	Type	Diameter	Gewicht/stuk	Doos van	RIZIV lijst	RIZIV code	CNK
79520	Rond	20mm	6g	10	641071	904025000286	2319 184
79530	Rond	30mm	8g	10	641071	904025000514	2319 192
79540	Rond	40mm	10g	10	641071	904025000523	2319 200
79601	Ovaal	22x38mm	10g	10	641071	904025000347	2904 050
79602	Ovaal	30x48mm	12,6g	10	641071	904025000356	2904 068
79603	Ovaal	38x56mm	13,8g	10	641071	904025000365	2904 241

Gelieve bij twijfel te refereren naar de verpakking van het product of contact op te nemen met de Hollister Customer Service:

**010 23 04 77 - [belgium.orders@hollister.com](mailto:belgium.orders@hollister.com)**

**Hollister België**  
Branch of Hollister France  
Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen. Opgelet, lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. Hollister en zijn logo en Adapt zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA. © December 2018 Hollister Incorporated. OST18N47