

Adapt Pasta



Indicaties en voordelen

- Vult oneffenheden rond de stoma op.
- Zorgt voor een goede afdichting tussen stoma en materiaal zodat het risico op lekkage verminderd wordt.

Eigenschappen

- Bevat een weinig alcohol
- Plastic tube, makkelijk uit te duwen
- Rode dop, snel herkenbaar

Gebruiksaanwijzing



1. Breng de pasta aan:
 - A. op de huidplaat rond de uitgeknipte opening, of
 - B. rechtstreeks op de peristomale huid, om zo oneffenheden op te vullen.
2. Gebruik eventueel een vochtige vinger om de pasta aan te brengen.
3. Wacht enkele seconden. Breng vervolgens het stomamateriaal aan, zoals gewoonlijk.
4. Plaats de dop op de tube en sluit goed af.

Veelgestelde vragen

Waarom heb ik een branderig gevoel bij het aanbrengen van de pasta?

De pasta bevat een weinig alcohol, zodat hij makkelijker aangebracht kan worden en resistenter is tegen vloeibare output. Dit gevoel zal snel verzachten. U kan eventueel de pasta ook vervangen door een Adapt ring.

Wat gebeurt er indien de pasta in contact komt met mijn stoma?

Deze pasta werd specifiek ontwikkeld voor stomazorg. Hij is dus niet schadelijk en er is geen enkel risico voor uw stoma.

Na het verwijderen van mijn materiaal zitten er nog restjes pasta op mijn huid. Hoe kan ik deze verwijderen?

U kan de pasta tijdens de verzorging verwijderen met lauw water. Indien er daarna nog restjes overblijven hoeft u niet te wrijven: ze zullen vanzelf verdwijnen bij een volgende wissel. Indien nodig kan u eventueel Adapt Oplosmiddel gebruiken.

Zorgt de pasta ervoor dat mijn huidplaat beter aanhecht?

Pasta is een opvulmiddel. Het voorkomt het risico op lekkage maar is geen kleefstof.

Referentie	Type	Gewicht/stuk	Doos van	RIZIV lijst	RIZIV code	CNK
79300	Tube	60g	1	641071	904025000277	1750 108
79301	Mini tube	14g	6	641071	904025000243	2384 188

Gelieve bij twijfel te refereren naar de verpakking van het product of contact op te nemen met de Hollister Customer Service:

010 23 04 77 - belgium.orders@hollister.com

Hollister België
Branch of Hollister France
Chaussée des Collines 52
1300 Wavre

www.hollister.be

Dit document is bestemd voor verpleegkundigen. Opgelet, lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing. Hollister en zijn logo en Adapt zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA. © December 2018 Hollister Incorporated. OST18N46