



Gabriel, utilisateur de produits CeraPlus®

Des accessoires qui  
contribuent à une plus  
grande sécurité et à une  
peau saine

Personnalisez votre appareillage en toute confiance



**Stomathérapie**  
Tout commence par une peau saine.

# Anneaux

## Une bonne étanchéité permet d'éviter les fuites.

- Imprégnés de céramides pour protéger votre peau (l'anneau 7806 ne contient pas de céramides)
- Comblent les creux et les plis autour de votre stomie, pour une surface plane qui améliore l'ajustement du protecteur cutané
- S'étirent, se moulent ou s'empilent
- Sans alcool, ne pique pas



### Anneau CeraRing™

Référence	Diamètre	Épaisseur	Boîte
8815	48mm	2.3mm	10 pièces
8805	48mm	4.5mm	
881527*	57mm	2.3mm	

\*disponible courant 2024



### Anneau Adapt®

Référence	Diamètre	Épaisseur	Boîte
7806	98mm	2.3mm	10 pièces



### Anneaux convexes ronds CeraRing™

Référence	Diamètre intérieur	Boîte
89520	20-25mm	10 pièces
89530	30-35mm	
89540	40-45mm	



### Anneaux convexes ovales CeraRing™

Référence	Diamètre intérieur	Boîte
89601	22×38mm	10 pièces
89602	30×48mm	
89603	38×56mm	




Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Utilisation des anneaux CeraRing™


## Option 1:

Appliquez l'anneau CeraRing™ plat ou convexe sur la face adhésive de votre protecteur cutané. Façonnez l'anneau plat jusqu'à ce qu'il ait la forme souhaitée (les anneaux convexes ne peuvent pas être façonnés).

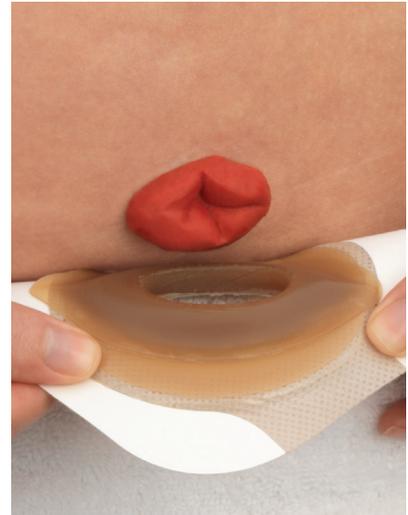

## Option 2:

Appliquez l'anneau CeraRing™ plat ou convexe sur votre peau, puis appliquez votre appareillage. Veillez à ce que l'anneau soit bien ajusté à la stomie.

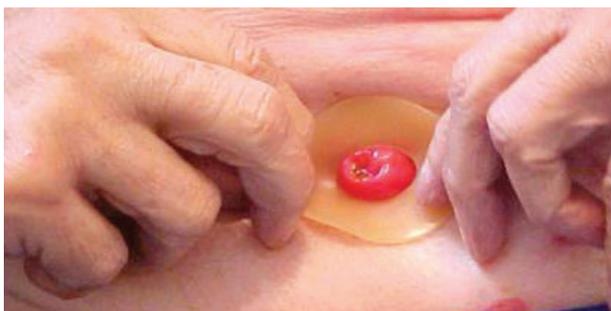


Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Renforts adhésifs CeraPlus®

**Pour une plus grande confiance dans la sécurité de votre équipement.**

Référence	Boîte	Information produit
79402	30 pièces	Utilisation de 1 à 3 renforts par protecteur cutané Matériau hydrocolloïde imprégné de céramides

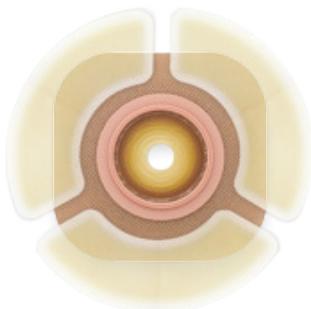

L'ajout d'un renfort adhésif supplémentaire **accroît le sentiment de sécurité** et contribue à prolonger la durée de vie du matériel.



Augmente le sentiment de sécurité dans **les activités physiques**



Convient aux **climats chauds** pour réduire le risque de détachement du bord du protecteur cutané

## Utilisation des renforts adhésifs CeraPlus®:

1. Retirez le protecteur cutané en place et nettoyez la peau autour de la stomie. Appliquez un nouveau protecteur cutané.
2. Retirez le support papier en étirant légèrement chaque extrémité du renfort adhésif.
3. Détachez un seul côté du support papier.
4. Placez l'extrémité adhésive du renfort adhésif le long du protecteur cutané ; couvrez à la fois le protecteur cutané et la peau adjacente. Retirez le reste du support papier.
5. Répétez l'opération pour tous les renforts adhésifs supplémentaires dont vous avez besoin autour de votre protecteur cutané.
6. Les renforts adhésifs peuvent être facilement retirés lors du changement de poche habituel.



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Dissolvant médical Adapt<sup>®\*</sup>

## Aide à éliminer le matériel tout en respectant la peau.

Dissolvant médical Adapt<sup>®</sup>

Référence	Type	Boîte	Information produit
7760	Lingettes	50 pièces	Sans alcool, ne pique pas
7737	Spray (50ml)	1 pièce	
7731	Spray (100 ml)	1 pièce	

Utilisation du spray :

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Décollez une petite partie du bord du protecteur cutané avec votre main.
3. Tenez l'aérosol de manière à ce que la flèche pointe vers le bas du protecteur cutané et vaporisez jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
4. Veillez à ce que la peau soit sèche et appliquez le nouvel appareillage comme à votre habitude.

### Spray

Tenez l'aérosol de manière à ce que la flèche pointe vers le bas du protecteur cutané et vaporisez jusqu'à ce que l'adhésif se détache.



- Aide à éliminer les adhésifs
- Aide à prévenir l'irritation de la peau causée par le retrait du protecteur cutané



\*Produit non remboursé

Utilisation de la lingette :

1. Décollez une petite partie du bord du protecteur cutané avec votre main.
2. Frottez avec la lingette sur les bords où le protecteur cutané tient encore, jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
3. Frottez avec la lingette sur tout résidu d'adhésif éventuel.
4. Veillez à ce que la peau soit sèche et appliquez le nouvel appareillage comme à votre habitude.

### Lingettes

Frottez avec la lingette sur les bords où le protecteur cutané tient encore, jusqu'à ce que l'adhésif se détache.



Frottez avec la lingette sur tout résidu d'adhésif éventuel.



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Désodorisant lubrifiant Adapt<sup>®\*</sup>

**Aide à prévenir les odeurs et contribue à faciliter la vidange de la poche.**

Référence	Boîte	Information produit
78500 (Bouteille)	1 bouteille	Solution tout-en-un; lubrifiant et désodorant dans le même produit
78501 (Sachets)	50 sachets	

## Utilisation pour les poches à vider :

1. Appliquez votre poche.
2. Bouteille: ajoutez environ 5 ml ou 1 cuillère à café (Figure 1).  
Sachet: ajouter le contenu complet du sachet (Figure 2).  
Fermez la poche de la manière habituelle.
3. Frottez pour bien enduire l'intérieur de la poche (Figure 3).  
Répétez les étapes 1 ou 2 après chaque vidange.



## Utilisation pour les poches fermées :

1. Ne pas retirer le papier de protection du protecteur cutané pour ajouter le produit.
2. Bouteille: ajoutez environ 5 ml ou 1 cuillère à café (Figure 4).  
Sachet : ajoutez le contenu complet du sachet.
3. Placez votre poche. Frottez pour bien enduire l'intérieur de la poche (Figure 3).



Aide à limiter la formation d'amas dans la poche et à faciliter sa vidange.

*\*Produit non remboursé*



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Pâte Adapt®



**Utilisé pour combler les irrégularités autour de la stomie et pour une meilleure étanchéité afin d'aider à prévenir les fuites.**

Référence	Boîte	Info produit
79300	1 pièce	Gros tube (60g)
79301	6 pièces	Mini tube (14g)



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Poudre Adapt®



**Aide à absorber l'humidité, à renforcer l'adhérence du protecteur cutané et aide à guérir et à protéger la peau.**

Référence	Boîte	Info produit
7906	1 pièce	Poudre (28.3g)



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

# Ceinture Adapt®



**Contribue à renforcer la sécurité du système.**

Référence	Boîte	Info produit
3774	1 pièce	Enfant - 25-43cm
7300	1 pièce	M - 58-109 cm
7299	1 pièce	L - 86-165cm



Scannez pour plus d'informations ou pour commander un échantillon

Des produits qui peuvent contribuer à une plus grande sécurité, à une peau saine et au confort.

	Référence	Information produit		Boîte	
<b>Anneaux CeraRing™</b>					
	Plat	8815	Épaisseur 2.3mm	Diamètre 48mm	10 pièces
		8805	4.5mm	48mm	
		881527*	2.3mm	57mm	
	Convexe rond	89520	20-25mm		10 pièces
		89530	30-35mm		
		89540	40-45mm		
	Convexe ovale	89601	22×38mm		10 pièces
		89602	30×48mm		
		89603	38×56mm		
*disponible courant 2024					
	<b>Anneau Adapt®</b>				
	7806	2.3mm	98mm	10 pièces	
	<b>Renforts adhésifs CeraPlus®</b>				
	79402	3 sections		30 pièces	
	<b>Dissolvant médical Adapt®</b>				
	7760 (Lingettes)	Sans alcool, ne pique pas		50 pièces	
	7737 (Spray)	Sans alcool, ne pique pas- 50ml		1 pièce	
	7731 (Spray)	Sans alcool, ne pique pas - 100 ml		1 pièce	
	<b>Désodorisant lubrifiant Adapt®</b>				
	78500 (Bouteille)	236ml		1 pièce	
	78501 (Sachets)	8ml		50 pièces	
	<b>Pâte Adapt®</b>				
	79300	Gros tube (60g)		1 pièce	
	79301	Mini tube (14g)		1 pièce	
	<b>Poudre Adapt®</b>				
	79402	Poudre (28.3g)		30 pièces	
	<b>Ceinture Adapt®</b>				
	3774	Enfant- 25-43cm		1 pièce	
	7300	M - 58-109cm		1 pièce	
	7299	L - 86-165cm		1 pièce	

Si vous avez des questions sur l'utilisation des accessoires, nous vous invitons à vous adresser à votre infirmier(e) stomathérapeute.

Ⓒ Avant d'utiliser le produit, assurez-vous de lire le mode d'emploi prévue, les contre-indications, les mises en garde et les précautions.

[www.hollister.be](http://www.hollister.be)