

# Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

## Beknopte handleiding met verzorgingstips

Deze beknopte handleiding bevat aanwijzingen voor de toepassing van het orale endotracheale fixatiesysteem Anchor Fast en de bijbehorende standaardverzorging. Met Anchor Fast kunnen orale endotracheale tubes met een diameter van 5 tot 10 mm worden gefixeerd.

LATEXVRIJ

### Aanbrengen

#### Stap 1

Maak de huid klaar

- Zorg ervoor dat de huid schoon en droog is en vrij van vetachtige resten.
- Gebruik geen huidreinigingsdoekjes of andere huidverzorgingsproducten in combinatie met het orale endotracheale fixatiesysteem.


#### Stap 2

Verwijder de beschermfolies

- Verwijder de beschermfolies van de twee huidplakken.

#### Stap 3


Breng het systeem aan bij de patiënt

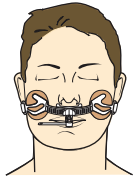

- Plaats het systeem midden op de bovenlip, zodat de niet-absorberende stabilisator de huid lichtjes raakt.
- Plaats de eenkliks-veiligheidsklem ongeveer 1 cm onder de bovenlip van de patiënt.
- Druk de twee huidplakken zacht tegen de huid van de patiënt.
- Houd het systeem op zijn plaats totdat de huidplakken goed hechten. Dit duurt ongeveer 30 seconden.

#### Stap 4


Breng de verstelbare nekband aan

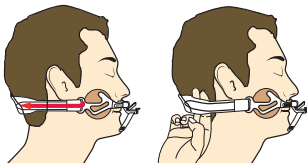

- Haal het smalle eind van de nekband door de plastic beugel.
- Maak het smalle eind van de nekband vast met het klittenband.
- Voor extra comfort en optimale veiligheid kan men de nekband aan beide zijden verstellen. **Trek de band niet te strak aan.**
- Laat een speling van twee vingers breed tussen de nekband en het achterhoofd van de patiënt.


#### Stap 5

Bevestig de endotracheale tube

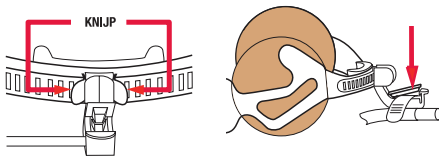

- Druk de klepjes aan weerszijden van de glijdende tubeshuttle in en verplaats de klem over de rail naar een locatie boven de tube.
- Verwijder de beschermfolie van de tubehuls, zodat de kleefband zichtbaar wordt. Zorg dat de tube droog is en helemaal vrij is van kleefresten. Breng daarna de tube aan in de huls van kleefband.
- Positioneer de tube onder de antislip-grijpers.
- Extra zorg is vereist bij het bevestigen van de tube; het luchtkanaal in de tube mag niet direct onder de antislip-grijpers komen te liggen. Doe de kleefband strak om de tube en trek het resterende gedeelte ervan door de veiligheidsklem.
- Veranker de huls van kleefband door de eenkliks-veiligheidsklem te sluiten (de hoorbare klik is het signaal dat de klem gesloten is).

### Standaardverzorging

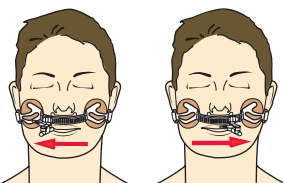

- Om de tube te verplaatsen, dient men de klepjes aan de buitenzijde van de shuttle in te drukken, waarna de shuttle links en rechts over de tuberail kan worden verschoven.
- Verplaats de tube ten minste elke twee uur of vaker indien de gezondheidstoestand van de patiënt dit vereist. Op deze manier wordt het risico op beschadiging van huid en/of lippen, die kan optreden ten gevolge van onverminderde druk, geminimaliseerd.

# Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

## Voorzorgsmaatregelen

---

- Het orale endotracheale fixatiesysteem is geëvalueerd in een onderzoek bij volwassen patiënten. Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij pediatrie patiënten.
  - Wees voorzichtig bij patiënten met volle of gezwollen lippen, gebitsprothesen, zwellingen van het gezicht en/of vooruitstekende tanden.
  - Het kan zijn dat de kaak van de patiënt niet de ondersteuning kan geven die nodig is voor het gebruik van het orale endotracheale fixatiesysteem. Dit kan het geval zijn bij patiënten die de voortanden van het bovengebit missen of geen bovenprothese kunnen dragen.
  - De ondersteuning die noodzakelijk is voor het bevestigen van de huidplakken kan ontbreken bij patiënten met gezichtsbehaving.
  - Nadat het orale endotracheale fixatiesysteem is aangebracht, dient men de patiënt regelmatig te controleren. Dit is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat zowel het orale endotracheale fixatiesysteem als de endotracheale tube nog steeds veilig en correct gepositioneerd is.
  - Om het risico van drukletsel te verminderen, dienen de lippen en de huid van de patiënt elke twee uur te worden gecontroleerd, of vaker indien de gezondheidstoestand van de patiënt dit vereist.
  - Staak het gebruik van het systeem indien de huid rood wordt of huidirritatie optreedt.
  - Herhaaldelijk verplaatsen van de endotracheale tube in distale of proximale richting kan het functioneren van de tubehuls beïnvloeden.
  - Extra zorg is vereist bij het bevestigen van de tube; het luchtkanaal in de tube mag niet direct onder de antislip-grijpers komen te liggen. Doe de huls strak om de tube en trek het resterende gedeelte door de veiligheidsklem.
  - Het orale endotracheale fixatiesysteem is bestemd voor eenmalig gebruik. **Om een goede hechting te waarborgen, dient men het systeem niet opnieuw te gebruiken.**
- 

Voor meer klinische informatie over onze producten kunt u bellen naar: 0800 02 303 52

### Referenties

1. Pieper, Barbara. "Mechanical Forces: Pressure, Shear, and Friction." Chapter 12 in *Acute & Chronic Wounds: Nursing Management*, 3rd ed., ed. Ruth A. Bryant (St. Louis, Mosby, Inc. 2007).
2. Panel for the Prediction of Prevention of Pressure Ulcers in Adults. "Pressure ulcer in Adults: Prediction Prevention." *Clinical Practice Guidelines*, Number 3, AHCPR Publication No. 92-0047. (Rockville, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Dept. of Health and Human Services. May 1992.)



**Hollister bv**  
Postbus 2662  
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000  
klantenservice@hollister.com  
www.hollister.nl